

GUIDE DE CHARGEMENT

Synthesis®

PRÉCHARGÉ

SIP | SIPY | PPLUS | PYPLUS | SIPT | SIPTY

Références

Implant hydrophile clair
Implant hydrophile jaune
Injecteur Accuject Pro à piston 1,6 mm
Injecteur Accuject Pro à piston 1,8 mm
Injecteur Accuject Pro à vis 1,6 mm
Injecteur Accuject Pro à vis 1,8 mm

1 Ouvrir le flacon et retirer la chambre de chargement en tirant sur la partie supérieure de la goupille (a), sans la désolidariser de la chambre de chargement (b).

2 Rincer abondamment la chambre de chargement avec une solution saline équilibrée stérile, en évitant tout contact avec les gants. Ne pas toucher l'implant.

3 Insérer la chambre de chargement dans le corps de l'injecteur, jusqu'à ce qu'elle se verrouille sur sa position.

4 Rincez l'implant par l'arrière de la chambre de chargement avec une solution saline équilibrée stérile en inclinant l'injecteur.

5 Appliquez la solution viscoélastique par l'orifice de remplissage de la goupille en direction de l'extrémité de la cartouche,

6 et par l'arrière de la chambre de chargement.

7 Poussez sur le piston jusqu'à ce que l'embout en silicone s'approche de la goupille.

8 Retirer délicatement la goupille de la chambre de chargement :

- saisir la goupille avec deux doigts tout en basculant vers le haut la charnière inférieure avec le pouce,
- soulever l'ensemble à la verticale.

9 Vérifier le bon positionnement de la lentille et fermer les ailettes de la chambre de chargement. Lorsque vous entendez le « clic », la lentille est bien en place.

10 Appuyer sur le piston de manière à positionner l'implant dans la zone de stockage du tunnel de la cartouche. Le système est prêt pour l'injection.

11 Une fois implanté, les détrompeurs de l'implant Synthesis doivent être orientés en haut à droite (A) et en bas à gauche (B).

